



SAFESEPT^{MAX} Instrument Disinfection Concentrate FV

Instrumentendesinfektion viruzid

- viruzid gemäß RKI-Empfehlung
- formaldehydfreies Konzentrat
- zur Schlussdesinfektion geeignet



PRODUKTBE SCHREIBUNG:

SAFESEPT MAX[®] Instrument Disinfection Concentrate FV ist ein besonders schnell wirksames, viruzides, flüssiges Konzentrat zur Desinfektion von Endoskopen und chirurgischen Instrumenten aller Art. Die formaldehydfreie Produktformulierung zeichnet sich durch wirtschaftliche Anwendungskonzentrationen, breite Wirksamkeit inkl. Viruzidie und Tuberkulozidie bei guter Materialverträglichkeit aus. SAFESEPT MAX[®] Instrument Disinfection Concentrate FV ist ideal zur viruziden Schlussdesinfektion von flexiblen und starren Endoskopen sowie medizinischen Instrumenten aller Art geeignet.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Desinfektion von medizinischen Instrumenten und Endoskopen.

WIRKUNGSSPEKTRUM UND DOSIERUNG GEM. VAH:

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid: 2 % - 15 min.; 1,5 % - 30 min.; 1 % - 60 min. tuberkulozid (M. terrae): 2 % - 15 min.; 1,5 % - 30 min.; 1 % - 60 min. viruzid inkl. HBV/HIV, Polio-, Adeno-, Papova-, Vakzinia-Viren: 2 % - 30 min.

ANWENDUNG:

Desinfektion im Tauchbadverfahren: Instrumente nach vorhergehender gründlicher Reinigung und anschließender Spülung in geöffnetem Zustand in die Gebrauchslösung einlegen. Sämtliche zu desinfizierende Oberflächen und Hohlräume müssen

von der Gebrauchslösung vollständig benetzt sein. Nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit Wasser (vorzugsweise vollentsalztes Wasser, VE-Wasser) abspülen und trocknen. Die Gebrauchslösung ist bei sichtbarer Verschmutzung sofort, spätestens jedoch arbeitstäglich zu wechseln. Kritische Instrumente anschließend in einem validierten Verfahren sterilisieren.

Endoskopaufbereitung: Endoskop nach Nutzung mit einem fusselreifen Tuch von groben Verunreinigungen befreien und anschließend vollständig in eine Reinigungslösung einlegen. Anforderungen an den Personalschutz und die Aufbereitungsempfehlung der Hersteller sind zu beachten. Nach erfolgter Reinigung Endoskope gründlich mit Wasser abspülen und in die SAFESEPT MAX[®] Instrument Disinfection Concentrate FV Gebrauchslösung vollständig einlegen. Es ist darauf zu achten, dass alle Kanäle gefüllt bzw. durchströmt sind. Nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit sterilem Wasser abspülen und trocknen.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Im Umgang mit SAFESEPT MAX[®] Instrument Disinfection Concentrate FV ist geeignete Schutzausrüstung (PSA) zu tragen. Weiterführende Informationen zum Arbeitsschutz siehe www.bgw-online.de. Instrumente und Wannen bei Umstellung auf SAFESEPT MAX[®] Instrument Disinfection Concentrate FV gründlich reinigen, um Chemikalienrückstände (z. B. Aldehyde) zu entfernen. Instrumentenwannen sind mindestens arbeitstäglich zu reinigen und zu desinfizieren, bevorzugt mit einem alkoholisch getränkten Einmal-Tuch.



SAFESEPT^{MAX} Instrument Disinfection Concentrate FV

Instrumentendesinfektion viruzid

- viruzid gemäß RKI-Empfehlung
- formaldehydfreies Konzentrat
- zur Schlussdesinfektion geeignet




Deutsch

ZUSAMMENSETZUNG:

100g enthalten: 12 g Glutaral.

BESONDERER HINWEIS:

Glutaral; Alkylethercarbonsäure; Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalz. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann die Atemwege reizen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

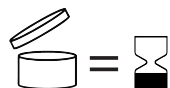

Die verwendete SAFESEPT MAX® Disinfection Concentrate FV ist bei sichtbarer Verschmutzung sofort, spätestens jedoch arbeitstäglich zu wechseln.

LISTUNGEN / PRODUKTSTATUS:

- Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VA
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

DARREICHUNGSFORMEN:

- | | |
|--------------|-------------|
| REF 988-2765 | 2L Flasche |
| REF 988-2766 | 5L Kanister |

ZUBEHÖR:

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| REF 979-6273 | Dosierpumpe für 2L Flasche |
| REF 979-6276 | Kanisterumfüllhahn |
| REF 979-6278 | Kanisterschlüssel |
| REF 979-6272 | Dosierpumpe für 5L Kanister |