


Nachfüllanweisung für die Kanister		
REF: 9000881 (5 kg), 9000882 (10kg)		
Erstellt: Corporate Brand Development	Seite 1 von 1	

Nachfüllanweisung für die Kanister

- Den Kanister auf eine stabile, ebene Fläche stellen, sodass der Ausgießer nach oben zeigt.
- Die Dosierpumpe auspacken und auf den Kanister aufschrauben.
- Anbruchdatum auf dem Kanister vermerken.
- 250 ml-Dispenserflasche mit Gel befüllen und mit Schraubverschluss verschließen.
- 250 ml-Dispenserflasche mit folgenden Angaben kennzeichnen:
Produktbezeichnung,
Hersteller,
Chargennummer und
Verwendbarkeitsdatum (= Anbruchdatum + 3 Monate, maximal aber das auf dem Kanister aufgedruckte Haltbarkeitsdatum).
- Die 250 ml-Dispenserflasche vor der erneuten Befüllung mit Ultraschallgel mit warmen Wasser und Spülmittel reinigen, mit klarem Wasser ausspülen und an der Luft/bei Raumtemperatur trocknen lassen.
- Die 250 ml-Dispenserflasche maximal für den Inhalt eines einzigen Kanisters verwenden.

Hersteller:

Henry Schein Inc.
135 Duryea Road
Melville, NY 11747 USA

Authorized EU Representative:

Henry Schein Services GmbH
Monzastrasse 2a
63225 Langen / Germany

Kontakt:

Tel: +49 6103 757 5000
cbdeurope@henryschein.com
www.henryscheinbrand.com



Revision: 2018/07