

EUROSEPT® XTRA
BIO-DESINFEKTIONSTÜCHER L

**SCHNELLE
UND EFFEKTIVE
DESINFEKTION,
JETZT IN EINEM 100 % BIOLOGISCH
ABBAUBAREN WISCHTUCH**



**WIRKSAM GEGEN VIREN
UND BAKTERIEN**



**100 % BIOLOGISCH
ABBAUBARE TÜCHER AUF
PFLANZENBASIS**

**AUS 100 % BIOLOGISCH ABBAUBAREN FASERN AUF
PFLANZENBASIS
PHENOLFREI | ALDEHYDFREI**

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung für das Produkt.

Heute bestellen unter **HENRYSCHEIN-DENTAL.DE**



**EXKLUSIVE MARKEN
UND PRODUKTE**



**VERLÄSSLICHE
QUALITÄT**



**INTELLIGENTE
EINSPARUNGEN**

EUROSEPT® XTRA BIO-DESINFEKTIONSTÜCHER L



Vorteile

100 % biologisch abbaubare Tücher aus pflanzlichen Fasern

Tücher mit höherem Gewicht bedeuten eine größere Reichweite mit weniger Tüchern

Schnelle und wirksame Formel*

Aldehyd- und phenolfrei

**Getestet und als wirksam gegen ein breites Spektrum von Viren und Bakterien befunden – einschließlich MRSA, TB, HIV-1 und H1N1*



CONDITIONS	EXPOSURE TIME
Bakterizid, Levurozid (4-Felder-Test) gemäß EN 16615 (geringe und hohe organische Belastung)	60 Sekunden
Bakterizid, levurozid gemäß EN 13727, EN 13697, EN 13624	30 Sekunden
Bakterizid, Levurozid (ink.MRSA) gemäß EN 1276 EN 1650 EN13697 (geringe organische Belastung)	60 Sekunden
Tuberkulozid gemäß EN 14348 (geringe organische Belastung)	60 Sekunden
Begrenzt viruzid gemäß EN 14476	30 Sekunden
Begrenzt viruzid plus, viruzid gemäß EN 14476 (geringe organische Belastung)	5 Minuten

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsfertige Flächendesinfektionstücher. Öffnen Sie die Sicherheitsfolie unter der Kappe und entnehmen Sie das erste Tuch aus der Packung. Brauchen Sie das entnommene Tuch schnellstmöglich auf, verwenden Sie es kein zweites Mal. Befeuchten Sie die Oberflächen vollständig mit den vorgetränkten Tüchern und verteilen Sie die Desinfektionslösung. Halten Sie die Oberfläche während der gesamten Einwirkzeit feucht. In Lebensmittelbereichen sind die Oberflächen mit Wasser in Trinkwasserqualität zu behandeln. Wischen Sie die Oberflächen nach der Desinfektion bei Bedarf mit einem hygienisch sauberen Tuch ab. Nur für den professionellen Einsatz vorgesehen. Bewahren Sie den Packungsdeckel und die Sicherheitsfolie fest verschlossen auf.

Inhaltsstoffe

40,0 % Ethanol, 9,5 % Propan-2-ol, 0,25 % Didecyldiammoniumchlorid, Essenz, Korrosionsinhibitoren

Weitere Informationen

Haltbarkeit: 2 Jahre in Originalverpackung; 28 Tage nach dem ersten Öffnen, wenn es gut verschlossen bleibt
MD: Class IIa

Henry Schein® EuroSept® Bio-Desinfektionstücher L

L FLOWPACK (20x22cm) 80 Stck

(9889964)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung für das Produkt.

Heute bestellen unter **HENRYSCHEIN-DENTAL.DE**