



EuroSept® Plus System Dispenser Wipes

- Vliestuchspender
- HS-Vliestücher
- System Wet Wipes
- System Wet Wipes Alkoholfrei



• Vliestuchspender

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Zu befüllen mit Vliestüchern und Desinfektionsmittel/Reiniger.

WICHTIG:

Vor der Wiederbefüllung ist der Spender inkl. Deckel zu reinigen und mit geeigneten Desinfektionsmitteln zu desinfizieren. Beim Befüllen ist zu empfehlen, die Art der Tränkflüssigkeit, deren Anwendungskonzentration sowie das Abfülldatum auf dem beigegefügten Zusatzetikett einzutragen.

STANDZEIT:

28 Tage

SMALL:

REF 988-2659 S Eurosept Plus System Dispenser small for size 25x25cm

Anwendung: Vliestuchrolle in den Spendereimer geben und mit 1,5L gebrauchsfertiger Desinfektionslösung tränken. Nach 30 Minuten können die Tücher benutzt werden. Eimer nach Gebrauch wieder fest verschließen.

LARGE:

REF 988-2660 L Eurosept Plus System Dispenser large for size 32x30cm

Anwendung: Vliestuchrolle in den Spendereimer geben und mit 2,5L gebrauchsfertiger Desinfektionslösung tränken. Nach 30 Minuten können die Tücher benutzt werden. Eimer nach Gebrauch wieder fest verschließen.

• HS-Vliestücher

DARREICHUNGSFORMEN:

REF 988-2661 S Eurosept Plus System Dry Wipes small 25x25cm - 3x70

REF 988-2662 L Eurosept Plus System Dry Wipes large 32x30cm - 6x90

REF 988-2663 S Eurosept Plus System Dry Wipes reinforced 24x25cm - 6x120



EuroSept®Plus System Dispenser Wipes

- Vliestuchspender
- HS-Vliestücher
- System Wet Wipes
- System Wet Wipes Alkoholfrei



• System Wet Wipes

- Einfache, schnelle „auf-den-Punkt“-Anwendung
- Für alle hygienisch sensiblen und patientennahe Bereiche geeignet
- Wirksam gegen alle behüllten Viren sowie Rota- und Noroviren

PRODUKTBESCHREIBUNG:

EuroSept®Plus System Wet Wipes sind gebrauchsfertige, mit einer alkoholischen Desinfektionslösung getränkte Tücher zur Desinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen in hygienisch sensiblen und patientennahen Bereichen. Ein Nachwischen der Fläche ist bei der Anwendung von EuroSept®Plus System Wet Wipes nicht erforderlich.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Gem. Medizinproduktegesetz (MPG): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung: Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art.

ANWENDUNG:

Oberflächen mit EuroSept®Plus System Wet Wipes abwischen. Hierbei auf vollständige Benetzung achten und Einwirkzeit einhalten. Öffnen Sie die Nachfüllpackung. Formen Sie aus der geöffneten Packung eine Rolle. Lassen Sie den Inhalt inkl. Beutel direkt in die Spenderdose gleiten. Ziehen Sie aus der Rollenmitte das erste Tuch durch die Öffnung im Deckel der Spenderdose und setzen Sie den Deckel wieder auf die Dose. Bitte befüllen Sie die Dose nur mit einer Nachfüllpackung mit EuroSept®Plus System Wet Wipes.

ZUSAMMENSETZUNG:

100 g Tränkflüssigkeit enthalten: 45 g Ethanol (CAS: 64-17-5), enthält Duftstoffe.

WIRKSPEKTRUM UND EINWIRKZEIT:

Flächendesinfektion (Wischdesinfektion), bakterizid, levurozid gem. VAH: 1 min.; Tuberkulozid (M.terrae): 1 min; begrenzt viruzid (inklusive HBV, HIV, HCV), Rota-Viren: 30 sec.; Noro-Viren (MNV): 1 min.



EuroSept® Plus System Dispenser Wipes

- Vliestuchspender
- HS-Vliestücher
- System Wet Wipes
- System Wet Wipes Alkoholfrei



BESONDERER HINWEIS:

Öffnen Sie die Nachfüllpackung. Lassen Sie den Inhalt inkl. Beutel direkt in die Spenderdose gleiten. Ziehen Sie aus der Rollenmitte das erste Tuch durch die Öffnung im Deckel der Spenderdose und setzen Sie den Deckel wieder auf die Dose. Bitte befüllen Sie die Dose nur mit einer Nachfüllpackung mit Schnelldesinfektionstüchern.

Achtung: Entzündbarer Feststoff. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/ Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur für den professionellen Gebrauch.



LISTUNGEN / PRODUKTSTATUS:

- Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH
- Registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: BAuA Reg.-Nr.: N-66672 / N-68686
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

DARREICHUNGSFORMEN:

- REF 988-0888 **S** Eurosept Plus System Wet Wipes Surface 25x25cm
- REF 988-2644 **L** Eurosept Plus System Wet Wipes Surface 32x30cm

• System Wet Wipes Alkoholfrei

- Alkoholfreie Tücher zur schnellen Desinfektion großer Flächen
- Schnell wirksam, besonders materialschonend
- Praktisch in der Anwendung

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Alkoholfreie, gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art, in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen sowie im medizinischen Bereich. Auf der Basis von quaternären Ammoniumverbindungen. EuroSept® Plus System Wet Wipes non-alcoholic sind alkoholfrei und enthalten keine Aldehyde und Phenole. Durch die hohe, flusenfreie Materialqualität, garantierte Wirkstoffabgabe und gute Reinigungskraft eignen sich EuroSept® Plus System Wet Wipes non-alcoholic besonders gut für alle professionellen Anwendungen.



EuroSept® Plus System Dispenser Wipes

- Vliestuchspender
- HS-Vliestücher
- System Wet Wipes
- System Wet Wipes Alkoholfrei



Deutsch

ANWENDUNGSGEBIETE:

Gem. Medizinproduktegesetz (MPG): Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen Flächen aller Art.

ANWENDUNG:

Zu desinfizierende Fläche vollständig benetzen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit einem Einmaltuch nachwischen.

ZUSAMMENSETZUNG:

100 g Tränkflüssigkeit enthalten: 0,5 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid; 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

WIRKSPEKTRUM UND EINWIRKZEIT:

Flächendesinfektion (Wischdesinfektion) bakterizid, levurozid gem. VAH: 1 Min., wirksam gegen alle behüllten Viren gem. RKI Empfehlung inkl. HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV/Influenza-/Grippe-Viren: 30 Sek.

LISTUNGEN / PRODUKTSTATUS:

- Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH
- Registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: BAuA Reg.-Nr.: N-66695 / N-68687
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

BESONDERER HINWEIS:

Öffnen Sie die Nachfüllpackung. Formen Sie aus der geöffneten Packung eine Rolle. Lassen Sie den Inhalt inkl. Beutel direkt in die Spenderdose gleiten. Ziehen Sie aus der Rollenmitte das erste Tuch durch die Öffnung im Deckel der Spenderdose und setzen Sie den Deckel wieder auf die Dose. Bitte befüllen Sie die Dose nur mit einer Nachfüllpackung mit Schnelldesinfektionstücher AF. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/ Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



DARREICHUNGSFORM:

- REF 988-2657** **S** Eurosept Plus System Wet Wipes Surface non-alcoholic 25x25cm
- REF 988-2665** **L** Eurosept Plus System Wet Wipes Surface non-alcoholic 32x30cm