

Die Sicherheit im Blick

Solofix® Safety – effektiver Schutz vor
Stichverletzungen bei der Kapillarblutentnahme



Erfüllt die TRBA 250

- Intuitives, einfaches Handling
- Schmerzarme Punktion
- Gleich bleibender Punktionserfolg

Solofix® Safety – So einfach. So sicher.

Sterile Einmallanzette zur Kapillarblutentnahme
mit automatischem Sicherheitsmechanismus

Einfache Handhabung

- Vorgespannter Sicherheitsmechanismus
- Definierter Blutfluss durch automatische Kontaktaktivierung
- Gleich bleibender Punktionserfolg durch standardisierte Einstichtiefe
- Automatischer irreversibler Nadelrückzug

Hoher Patientenkomfort

- Geringer Schmerz und minimale Gewebeverletzung durch präzise linear geführte Lanzette sowie schnellen Punktions- und Rückzugsmechanismus



Erfüllt die TRBA 250

- Vermeidung von Nadelstichverletzungen: Die Nadel ist vor und nach der Punktion sicher im Gehäuse eingeschlossen – eine Wiederverwendung ist ausgeschlossen

Und so funktioniert's

1. Grüne Sterilkappe abdrehen und herausziehen
2. Lanzette auf gewünschte Einstichstelle setzen, Mechanismus durch leichten Druck aktivieren – deutlich hörbar durch ein Klick
3. Blutprobe wie gewohnt aufnehmen

Weitere Informationen zur TRBA 250 und den B. Braun Sicherheitsprodukten finden Sie auf unserer Website:
www.sicherheitsprodukte.bbraun.de

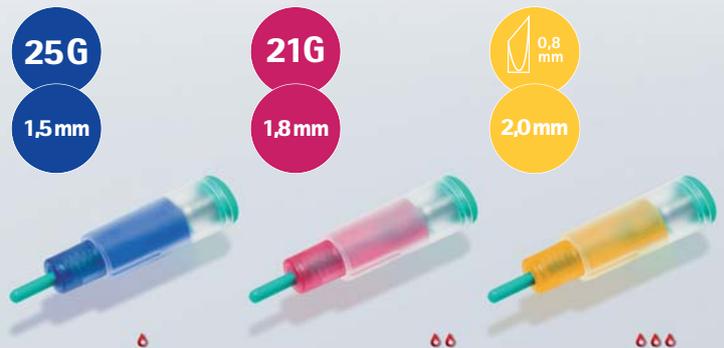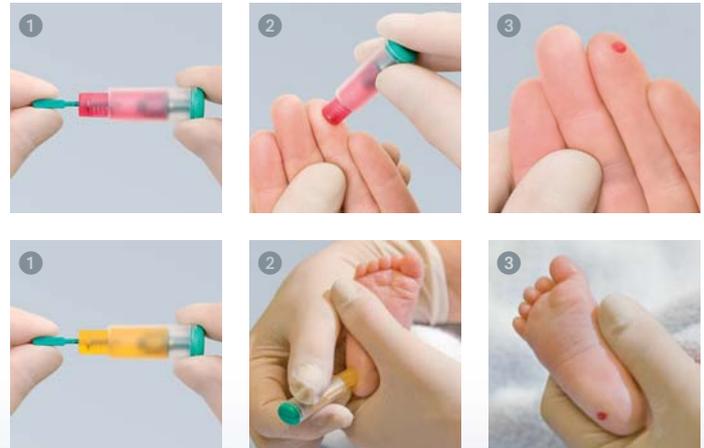

Solofix® Safety Fine
Geringer Blutfluss –
z. B. zur Blutzucker-
messung

Solofix® Safety Universal
Mittlerer Blutfluss –
allgemeine Blutdiagnose

Solofix® Safety Neonat
Hoher Blutfluss – Fersen-
applikation bei Neuge-
borenen, Fingerblutent-
nahme bei Erwachsenen

Größe	25G	21G	0,8 mm Klinge
Punktionstiefe	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm
Blutprobe	< 10 µl	10 - 30 µl	70 - 100 µl
VE (Stück/Pack.)	200	200	200
REF	6183010	6183000	6183020
PZN	9042230	1119660	9042247